

LetiLab

Servicios de diagnóstico e inmunología

- Especialistas en Dermatología
- Innovadores en el diagnóstico e Inmunoterapias

20
AÑOS

como referentes en
Dermatología
e **Inmunología**

 **LETI**
Pharma



¿Cómo trabajar con nosotros?



Hoja de pedido

Descarga la hoja de pedido en nuestra web y completa los datos e historia clínica.



Si no has trabajado nunca con nosotros no olvides solicitar el alta de cliente a través de nuestro correo electrónico o teléfono.



Puedes solicitarnos el material para el envío de muestras de forma gratuita.



Atención al cliente

Nuestro servicio de atención al cliente te ayuda a gestionar pedidos, actualizar tus datos o registrarte como nuevo cliente y resolver incidencias.



+34 93 584 33 88



saludanimal@leti.com



Envío de muestras

Solicite por teléfono a NACEX la recogida de muestras en su clínica.

NACEX:+34 93 223 86 20 - Agencia: 820 - Abonado N° 2.208, Email: 0820.operativa@nacex.es

Transporte GRATUITO. Consúltanos otras mensajerías.



Resultados y facturas

El envío de resultados y facturas se realiza a través de correo electrónico y, puedes consultarlos y descargarlos en nuestra web.

(<https://clientes.saludanimal.leti.com/es>)



Seguimiento de vacunas

Puedes conocer el estado de fabricación en que se encuentra tu vacuna y la fecha aproximada de entrega en la zona clientes de nuestra web.

<https://vacunas.leti.com/>



Servicio de asesoría

Puedes consultar dudas sobre el caso remitido y sobre los resultados a nuestros especialistas.

Si tienes casos complicados y necesitas ayuda, llámanos o escríbenos un mail con las fotos y la descripción del mismo.

**¡NUEVO
TELÉFONO!**



+34 93 394 68 48



consultasmedicasah@leti.com



Laboratorio

Puedes contactar con el laboratorio para solicitar la ampliación de pruebas, el material necesarios para el envío de tus muestras y preguntar por la situación de tus pruebas/resultados.



saludanimal.laboratorio@leti.com

Toda la información en: www.leti.com/animalhealth

¿Qué pruebas diagnósticas te ofrecemos?

	TEST	MUESTRA	VOLUMEN	MATERIAL	OBSERVACIONES
ALERGIA	AMBIENTAL: screening / panel AMBIENTAL ALLERCEPT FELINO: panel ALIMENTARIO: screening / panel AMBIENTAL + ALIMENTARIO: screening / panel completo TEST DE REACTIVIDAD AL ALIMENTO	sangre, suero, plasma	3 ml sangre 1,5 ml suero o plasma	tubo seco tubo EDTA tubo heparina	Suspensión de corticoides y/o ciclosporina 4 semanas
	Inmunoterapia alérgeno-específica.	Las inmunoterapias alérgeno-específicas, incluye tratamientos subcutáneos y orales para la dermatitis atópica.			
LEISHMANIA	SEROLOGÍA DE LEISHMANIA	sangre, suero, plasma	1 ml sangre 0,5 ml suero	tubo seco, tubo EDTA, tubo heparina	-
	PCR CUANTITATIVA LEISHMANIA	sangre	1 ml	tubo EDTA	No serán procesables muestras coaguladas ni enviadas con tubo de heparina
		médula ósea	0,3 ml	tubo EDTA/seco	
		aspirado de ganglio	0,5 ml	tubo EDTA/seco	
PROTEINOGRAMA	sangre, suero, plasma	1 ml sangre 0,5 ml suero	tubo seco, tubo EDTA, tubo heparina	No serán procesables muestras hemolíticas	
DERMATOPATOLOGÍA	BIOPSIA DERMATOLÓGICA	piel	-	contenedor formol 10 %	Previamente suspender corticoides 1 semana y administrar antibióticos 2 semanas
	Pruebas complementarias (IPI Leishmania/tinciones especiales)				
	BIOPSIA ONCOLÓGICA	neoplasia cutánea	-	contenedor formol 10 %	-
	Pruebas complementarias (IPI neoplasia/paneles oncológicos, etc.)				
CITOLOGÍA DE ASPIRADO	aspirado de masa y/o ganglio	-	portaobjetos/ jeringuilla	-	
MICROBIOLOGÍA	CULTIVO MICROBIOLÓGICO	pústula, collarete epidérmico, fístula, exudado ótico	-	hisopo estéril	Sin tratamiento antibiótico (sistémico/tópico) durante 1 semana
		biopsia de piel	-	suero fisiológico	
	CITOLOGÍA CUTÁNEA/ÓTICA	exudado cutáneo u ótico, contenido pústula	-	portaobjetos, hisopo no estéril, celo	
CULTIVO DERMATOFITOS PCR DERMATOFITOS	escamas, pelos, respados, costras	-	contenedor estéril	Especificar si está recibiendo tratamiento antifúngico. Desinfectar la zona con alcohol	
PARASITOLOGÍA	TRICOGRAMA	pelos completos sobre un porta o en un contenedor	-	portaobjetos/ contenedor estéril	Depilar en sentido al crecimiento del pelo
	RASPADOS CUTÁNEOS	raspado superficie o profundo	-	portaobjetos/ bisturí aceite mineral	-



Plataforma de autoformación

Mantente al día en Dermatología y Leishmaniosis

Te presentamos un espacio que te permitirá una autoformación a través de:



Materiales digitales

(revista electrónica, desafíos clínicos, materiales descargables...).



Formaciones en directo, tanto digitales como presenciales.




Vídeos formativos realizados con **expertos en Dermatología y Leishmania.**



Consulta digital que te permitirá **concertar una cita** y poder discutir sobre los casos clínicos en los que puedes tener dudas.

ACCEDE AL ESPACIO DE FORMACIÓN

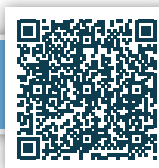

¿Tienes dudas sobre un caso clínico?

Pregunta al experto

Servicio de asesoría en Oncología, Leishmaniosis, Dermatología y Nutrición clínica

VER EL VIDEO



ACCEDE AL ESPACIO PREGUNTA AL EXPERTO

